

## Circular Informativa

---

N.º 155/CD/550.20.001

Data: 24/10/2016

Assunto: **Desfibriladores Automáticos Externos Fred Easy**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

---

O fabricante **Schiller Medical SAS** informou que a bateria interna (independente da bateria principal azul) do seu desfibrilhador automático externo **Fred Easy** tem de ser substituída de 6 em 6 anos, conforme indicado no manual do utilizador na secção "Manutenção", para garantir o correto funcionamento do dispositivo. Esta substituição requer a intervenção de um técnico qualificado.

Os desfibriladores automáticos externos são utilizados em situações de emergência no tratamento da paragem cardíaca em casos de fibrilação ventricular, podendo existir em ambiente hospitalar e em ambiente extra-hospitalar, nomeadamente em locais públicos.

Assim, os utilizadores que possuam desfibriladores com mais de 6 anos em que a bateria interna ainda não tenha sido substituída, devem contactar com o distribuidor local da empresa Schiller Medical SAS (Geranswers – telefone 219143157). Estes desfibriladores podem continuar em serviço enquanto se aguarda a substituição da bateria, devendo ser controlada, semanalmente, a disponibilidade de funcionamento.

Para os desfibriladores com menos de 6 anos o fabricante recomenda que seja agendada a sua manutenção.

Dada a dificuldade em localizar todos os utilizadores destes desfibriladores em Portugal, o Infarmed recomenda aos utilizadores que contactem com o respetivo distribuidor caso ainda não tenham recebido a informação sobre a substituição da bateria interna.

Quaisquer incidentes ou outros problemas relacionados com este dispositivo devem ser notificados à Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 71 45; fax: +351 21 111 7559; e-mail: [dvps@infarmed.pt](mailto:dvps@infarmed.pt).

O Conselho Diretivo