

N.º 009/CA
Data: 31-1-2005

Assunto: **Incidentes com cadeiras de rodas utilizadas em veículos com elevadores**

Para: Público em geral

Contacto no INFARMED: Departamento de Vigilância de Produtos de Saúde
(Tel: 217987145; Fax: 217987155; email: dvps@infarmed.pt)

Ex.mo(a) Senhor(a),

O INFARMED foi informado pela Autoridade Competente do Reino Unido (MHRA) da ocorrência de vários incidentes com cadeiras de rodas à entrada e saída de veículos, principalmente os que dispõem de elevadores. Destes incidentes resultaram ferimentos graves ou mortes, principalmente devido a quedas a partir das plataformas. Verificaram-se incidentes dos seguintes tipos:


- Queda da cadeira de rodas a partir duma plataforma elevada devido a falha dos travões e/ou das guardas;
- Queda do operador a partir duma plataforma elevada na altura da colocação da cadeira de rodas no elevador;
- Deslocamento para trás da cadeira de rodas quando o veículo inicia a marcha, caso a mesma não esteja correctamente fixada pode, inclusivé, levar o utilizador da cadeira a embater no elevador.

A análise destes incidentes mostrou que alguns foram devidos à falta de procedimentos e treino adequado dos condutores, assistentes e utilizadores. A falta de manutenção adequada quer dos elevadores quer das cadeiras de rodas também foi causa de alguns incidentes. Como exemplo dos mesmos, refere-se uma situação em que a quebra de um fecho desgastado levou à rotação da plataforma, o que, por sua vez, originou o aprisionamento do operador entre o veículo e a plataforma.

No seguimento destes dados, o INFARMED recomenda que:

- Todos os utilizadores e assistentes sejam adequadamente treinados em relação a todos os aspectos dos procedimentos para a utilização segura dos elevadores dos veículos, de acordo com as instruções dos fabricantes.
- Se treine a evacuação dos passageiros de forma alternativa, caso o elevador deixe de funcionar correctamente devido a acidente ou avaria.
- Seja efectuada a manutenção dos elevadores e das cadeiras de rodas de acordo com as recomendações dos fabricantes.
- Todos os incidentes/quase incidentes relacionados com a utilização de elevadores de cadeiras de rodas sejam comunicados ao INFARMED. Para tal poderá ser utilizado o modelo disponível em www.infarmed.pt/pt/vigilancia/prod_saude/profissionais_saude/index.html

O Conselho de Administração

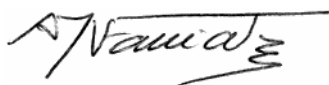

(António Faria Vaz)