

N.º 016/CD
Data: 08/02/2011

Assunto: **Kits de extensão IV com várias portas e com tampas ventiladas**

Para: Profissionais de saúde

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt


O Infarmed foi informado pela Autoridade Competente do Reino Unido (MHRA) da ocorrência de um incidente (acidente vascular cerebral) quando um *kit* de extensão com uma tampa ventilada na sua porta em Y foi ligado a uma linha central.

Os fabricantes podem utilizar as tampas ventiladas durante o processo de fabrico, para permitir a entrada e a saída do gás óxido de etileno no *kit* de extensão IV aquando da esterilização. Se estes *kits* forem utilizados com estas tampas ainda colocadas, é possível ocorrer entrada de ar na linha, existindo o risco de embolismo gasoso.

Assim, o Infarmed recomenda aos fabricantes destes dispositivos que alertem os utilizadores para não deixarem as tampas ventiladas nas portas não utilizadas. As tampas ventiladas devem ser substituídas por tampas não ventiladas ou outra alternativa adequada.

O Infarmed informa ainda que existem dispositivos alternativos, que são fornecidos com tampas não ventiladas.

O Conselho Directivo

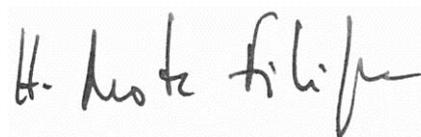

Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Directivo