

Circular Informativa

N.º 059/CD/8.1.7.

Data: 28/03/2013

Assunto: **Elevadores de doentes das marcas Gemini, Excelsior, Minerva e Minstrel fabricados por Medibo Medical Products**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Constatou-se que os elevadores de doentes das marcas **Gemini, Excelsior, Minerva e Minstrel**, fabricados por **Medibo Medical Products**, são utilizados para além do seu período de vida útil estimado (10 anos) e sem manutenção ou reparação adequadas, as quais são essenciais para dispositivos desenvolvidos/concebidos para levantamento e transferência de pessoas vulneráveis e incapacitadas.

Nestas situações, o período de vida útil dos equipamentos poderá ser significativamente inferior aos 10 anos.

O actual fabricante - **ArjoHuntleigh** - recebeu algumas notificações de incidentes envolvendo elevadores com mais de 10 anos de utilização, os quais falharam durante a utilização. Verificou-se ainda que, para alguns modelos, o período de vida útil não estava claramente indicado no manual de utilizador.

Consequentemente, o fabricante **ArjoHuntleigh** recomenda o seguinte:

- A retirada de utilização dos equipamentos com mais de 10 anos;
- A implementação de um plano de manutenção preventiva para todos os equipamentos, de acordo com a informação prestada pelo fabricante;
- A revisão de todos os equipamentos que não tenham tido manutenção técnica.

Em Portugal, não foi notificado ao Infarmed qualquer incidente relacionado com estes elevadores de doentes.

Atendendo a que não foi possível avisar directamente todas as entidades que adquiriram e/ou utilizam estes dispositivos (pelo facto de um dos distribuidores já não se encontrar em atividade) o Infarmed recomenda o contacto com a ArjoHuntleigh Portugal a todas as entidades que ainda não tenham recebido o aviso de segurança.

O Conselho Diretivo


Eurico Castro Alves
Presidente do
Conselho Diretivo