

## Circular Informativa

N.º 082/CD/8.1.6

Data: 17/04/2013

Assunto: **Substituição dos medidores de glicemia OneTouch Verio Pro e OneTouch Verio IQ**

Para: Divulgação Geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

A Lifescan está a proceder à recolha voluntária e substituição de todos os medidores de glicemia OneTouch Verio Pro e OneTouch Verio IQ devido, respetivamente, à ocorrência de resultados incorretos e ao facto de o aparelho se desligar quando as amostras de sangue apresentam níveis de glicemia extremamente elevados – iguais ou superiores 1024 mg/dl, pelo que não funcionam como o esperado. Esta situação pode levar a um tratamento incorreto ou atrasar o tratamento adequado de hiperglicemia extrema, resultando em riscos graves para a saúde.

Para valores de glicemia de 600 mg/dl ou acima, estes medidores deviam apresentar uma mensagem de «GLIC.DEMAS.ALTA (acima de 600 mg/dl)».

A probabilidade de ocorrência de níveis de glicemia iguais ou superiores a 1024 mg/dl é rara, no entanto constitui um sério risco para a saúde e requer assistência médica imediata.

Até à data não foi notificado qualquer incidente semelhante, contudo o. Infarmed recomenda o seguinte aos utilizadores destes medidores de glicemia:

- Contacto com a entidade onde adquiriu o medidor para que este possa ser substituído;
- Até à substituição ser efetuada, estes medidores podem continuar a ser utilizados. No entanto, se for detetado qualquer problema contacte o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro;
- Também está disponível o Serviço de Apoio a Clientes da Lifescan – 800 855 733 – para substituição dos medidores.

O Conselho Diretivo

  
Eurico Castro Alves  
Presidente do  
Conselho Diretivo