

## Circular Informativa

---

N.º 177/CD/8.1.7

Data: 14-08-2014

Assunto: **Tiras de teste Accu-Chek Compact e testes Accu-Chek Mobile**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

---

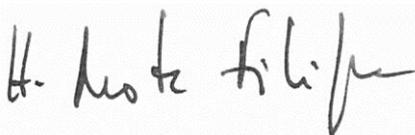
As tiras de teste **Accu-Chek Compact** e os testes **Accu-Chek Mobile** do fabricante **Roche Diagnostics GmbH** podem fornecer valores de glicemia incorretos (mais baixos do que o esperado) em doentes tratados com ceftriaxona administrada por via endovenosa ou intramuscular.

Os dispositivos em causa têm as seguintes referências:

Produto	Referência
Tiras-teste Accu-Chek Compact	05599415046
Testes Accu-Chek Mobile	05953740046

Esta limitação de utilização foi incluída na rotulagem destes dispositivos médicos, alertando-se os doentes sujeitos a terapêutica com ceftriaxona para o facto de dever ser utilizado um sistema alternativo de monitorização da glicemia durante o período de duração do referido tratamento.

O Conselho Diretivo

  
Helder Mota Filipe  
Vice-Presidente do  
Conselho Diretivo