

Circular Informativa

N.º 009/CD/8.1.7.

Data: 14/01/2015

Assunto: **Contrafação de transdutores de ultrassons Toshiba**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

A autoridade competente do Reino Unido (MHRA) publicou no seu *site* um alerta relativo à deteção de **transdutores de ultrassons Toshiba** contrafeitos.

De acordo com esse alerta, os produtos contrafeitos podem ser identificados por um ou mais dos seguintes aspetos:

- a etiqueta apresenta uma má adesão ao dispositivo e é feita de papel; também poderá ser removida facilmente e deixar resíduos (as etiquetas da Toshiba são de plástico ou metal e são difíceis de remover);
- o texto descritivo poderá estar incorreto - um transdutor linear poderá estar descrito como "convexo";
- desde 2005 os números de série da Toshiba têm dez caracteres (ex. TDA1293472); qualquer etiqueta com menos caracteres é provavelmente contrafeita;
- a leitura do código QR (se existente) na etiqueta não reencaminhará o utilizador para um *website* ou apresentará um tipo de sonda e número de série diferentes;
- o logotipo e palavra Toshiba poderão não ser tão acentuados e o revestimento poderá ter um acabamento diferente, quando comparados com uma sonda genuína;
- as cabeças dos transdutores Toshiba contrafeitos podem ser substancialmente mais leves que as dos dispositivos Toshiba originais.


Imagens relativas a produto contrafeito podem ser encontradas em anexo.

A comunicação da MHRA poderá ser consultada em <http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetywarnings/MedicalDeviceAlerts/CON484998>.

Em Portugal, até à data, não foram identificados **transdutores de ultrassons Toshiba** contrafeitos, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda a quem possua este tipo de dispositivos médicos que atente aos aspetos supramencionados que permitem a identificação dos artigos contrafeitos.


A existência em Portugal de dispositivos com as características indicadas deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo

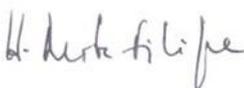

Helder Mota Filipe
Vice-Presidente
do Conselho Diretivo

Características de transdutores de ultrassons Toshiba contrafeitos

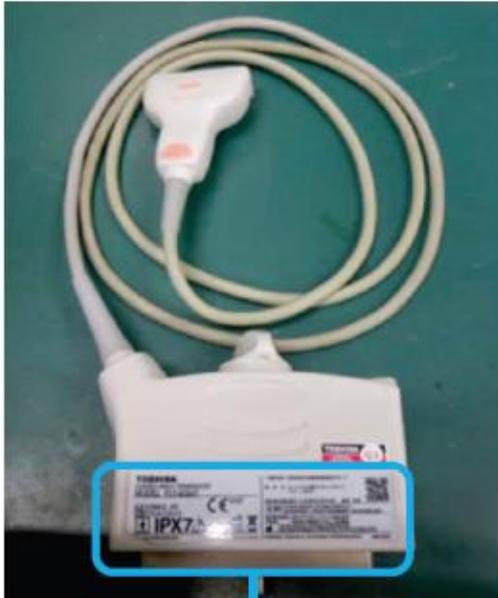

Esta etiqueta é falsa: é feita de papel e apresenta má adesão.



A etiqueta indica "convex array transducer" mas o dispositivo é na realidade um transdutor linear

A palavra Toshiba não é tão acentuada e o revestimento tem um acabamento diferente, quando comparados com uma sonda Toshiba genuína

