

## Circular Informativa

---

N.º113/CD/550.20.001

Data: 03/08/2018

Assunto: **Eletrocardiógrafos de 12 derivações Cardio M e Cardio M Plus**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

---

Os eletrocardiógrafos de 12 derivações **Cardio M** e **Cardio M Plus** têm um pedestal metálico que pode partir os encaixes plásticos e a cobertura plástica interna (isolamento), expondo o interior do dispositivo. Este facto pode permitir o contacto entre o pedestal metálico e os componentes elétricos.

Para minimizar problema, o fabricante Medical ECONET GmbH recomenda aos utilizadores o seguinte:

1. Desligar o dispositivo da corrente elétrica.
2. Realizar uma inspeção visual ao pedestal metálico (figura 1).
3. Se algum dos encaixes ou cobertura em plástico se encontrar danificado, contactar o distribuidor/fabricante.
4. Retirar o pedestal do dispositivo, mesmo que não haja dano externo visível.

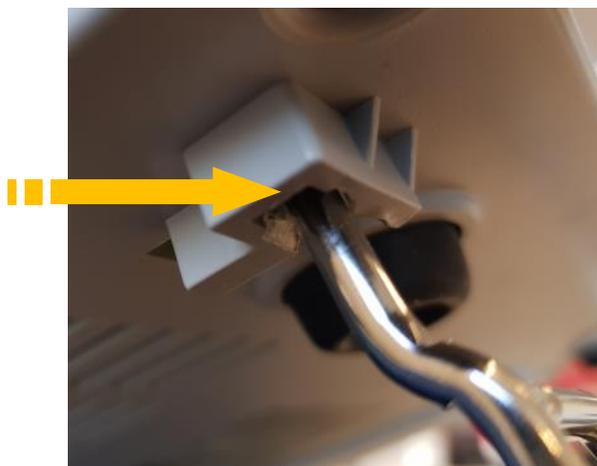


Figura 1 - Parte inferior do dispositivo Cardio M / Cardio M plus, base de suporte em metal

O Infarmed recomenda a todos os utilizadores destes dispositivos que procedam de acordo com o aviso de segurança do fabricante e caso não o tenham recebido entrem em contacto com o seu distribuidor / fabricante.

Quaisquer incidentes ou outros problemas relacionados com estes dispositivos médicos devem ser notificados à Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 71 45; fax: +351 21 111 7559; e-mail: [dvps@infarmed.pt](mailto:dvps@infarmed.pt).

## O Conselho Diretivo