



SARS-CoV-2 Antigen Test Kit
(Colloidal Gold)

Genrui

SARS-CoV-2 Teste Antígeno
(método de fluxo lateral)

Conteúdo Embalagem:

- 1× Cassete Teste
- 1× Tubo Solução Amostra
- 1× Instruções Utilização
- 1× Zaragatoa Esterilizada
- 1× Saco Risco Biológico



Teste Rápido

1 TESTE

Autoteste COVID-19 – Regime Excepcional

EC REP

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd
2595AA, The Hague, Netherlands
Email: peter@lotusnl.com



PRODUZIDO POR:
Genrui Biotech Inc.
4-10F, Building 3, Geya Technology Park
Guangming District, 518106 Shenzhen, China

15

SARS-CoV-2 Teste Antígeno

- 1 Utilizando a zaragatoa, recolha a amostra seguindo as instruções do folheto.
- 2 Coloque a amostra dentro do tubo, em contacto com a solução e rode a zaragatoa 5-6 vezes contra as paredes do tubo.
- 3 Deixe repousar por 1 minuto, depois disso apertar as paredes do tubo para espremer a amostra e retire a zaragatoa. Coloque a tampa no tubo e agite bem.
- 4 Retire a tampa branca do tubo, e com o mesmo na posição vertical, coloque 0,1mL (aprox. 3-4 gotas) da solução na abertura da casete de teste.
- 5 Aguarde 15 minutos e interprete o resultado do teste. Os resultados do teste não deverão ser lidos quando passados 20 minutos ou mais.

15 MINUTOS

3-4 GOTAS

5-6 VEZES

1 MINUTO

POSITIVO NEGATIVO INVÁLIDO INVÁLIDO



+30°C 1T/kit



175.6

27.4

17

68.6

18.6

68.6

18.1

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit
(Colloidal Gold)